

販売名：ダイヤモンドステントセット
 医療機器承認番号：21600BZZ00031A01
 クラス分類：Ⅲ（高度管理医療機器）
 保険請求分類：自動装着システム付・一時留置型

経内視鏡的胆管用ステント

形状	外径	フラップ間長	システム有効長	適合ワイヤー径	適合鉗子口径	サイドホール数	製品番号	JANコード
両フラップ	5Fr	3cm	200cm	0.025inch	2.8mm	6	ERB-RF-50-30-200-SH6	4582142527530
		5cm				10	ERB-RF-50-50-200-SH10	4582142527547
		7cm				14	ERB-RF-50-70-200-SH14	4582142527554
		9cm				18	ERB-RF-50-90-200-SH18	4582142527561
		12cm				24	ERB-RF-50-120-200-SH24	4582142527578
		15cm				30	ERB-RF-50-150-200-SH30	4582142527585
	7Fr	3cm		0.035inch	3.2mm	6	ERB-RF-70-30-200-SH6	4582142527592
		5cm				10	ERB-RF-70-50-200-SH10	4582142527608
		7cm				14	ERB-RF-70-70-200-SH14	4582142527615
		9cm				18	ERB-RF-70-90-200-SH18	4582142527622
		12cm				24	ERB-RF-70-120-200-SH24	4582142527639
		15cm				30	ERB-RF-70-150-200-SH30	4582142527646

販売名：ダイヤモンドステントセット
 医療機器承認番号：22700BZX00392A01
 クラス分類：Ⅲ（高度管理医療機器）
 保険請求分類：不可

経内視鏡的膵管用ステント

形状	外径	フラップ間長	システム有効長	適合ワイヤー径	適合鉗子口径	サイドホール数	製品番号	JANコード			
片フラップ	5Fr	3cm	200cm	0.025inch	2.8mm	4	ERP-KF-50-30-200-SH4	4582142527813			
		5cm				8	ERP-KF-50-50-200-SH8	4582142527820			
		7cm				12	ERP-KF-50-70-200-SH12	4582142527837			
		9cm				16	ERP-KF-50-90-200-SH16	4582142527844			
両フラップ	5Fr	3cm				6	0.025inch	2.8mm	6	ERP-RF-50-30-200-SH6	4582142527691
		5cm							10	ERP-RF-50-50-200-SH10	4582142527707
		7cm							14	ERP-RF-50-70-200-SH14	4582142527714
		9cm							18	ERP-RF-50-90-200-SH18	4582142527721
	7Fr	3cm		6	0.035inch	3.2mm	6	ERP-RF-70-30-200-SH6	4582142527752		
		5cm					10	ERP-RF-70-50-200-SH10	4582142527769		
		7cm					14	ERP-RF-70-70-200-SH14	4582142527776		
		9cm					18	ERP-RF-70-90-200-SH18	4582142527783		
両フラップ	7Fr	12cm		24	0.035inch	3.2mm	24	ERP-RF-70-120-200-SH24	4582142527790		
		15cm					30	ERP-RF-70-150-200-SH30	4582142527806		

プラスチックステントシステム

Harmo Ray

ハーモレイ

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。 ※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元
シルックス株式会社
 〒333-0816 埼玉県川口市差間3-32-14
 TEL 048-290-5278 FAX 048-298-7681


販売元
 **ハナコメディカル株式会社**
Hanacomedical CO.,LTD.
 本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
 TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
 URL: <http://www.hanacomedical.co.jp/>
 E-mail: eigyout@hanacomedical.co.jp

 **ハナコメディカル株式会社**
Hanacomedical CO.,LTD.

新たなリリースシステムによる新たな可能性をご提案します。

Harmo Ray


従来にないインターロック方式によるリリース方法（特願 2018-138996/ シルックス株式会社）により、5Fr 径の一体型ステント留置が可能となりました。胆管強度狭窄症例や膵管ドレナージへのより良いアプローチの選択肢として“Harmo Ray”をご提案します。

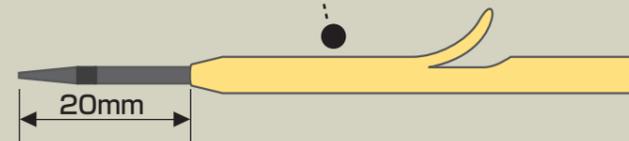

スムーズな挿入を可能にしたテーパリング加工


チューブステント：インナーカテーテルとの段差抵抗を軽減する先端テーパ加工。
膵管へのアプローチを考慮したショートインナーカテーテル（先端部 20 mm）。

【両フラップ】

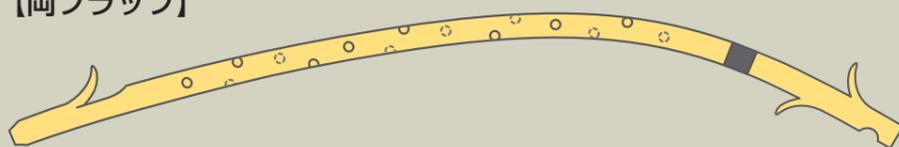


ステントチューブの特徴

ドレナージ効果の向上のため、螺旋状にサイドホールをあけた多側孔タイプをラインナップ。
フラップ加工による留置後の迷入、脱落防止。
有効長 30mm～150mm までの豊富なバリエーションをご用意。

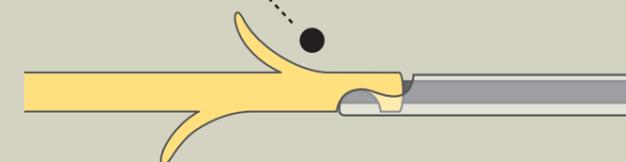

インターロック方式による一体型構造

従来にないデリバリーシステムの構造により細径タイプの設計が可能となりました。
また、デリバリーとチューブステントが一体となったシステムの為、チューブステントをリリースする際の抵抗が軽減されスムーズなチューブステントの挿入が可能となりました。

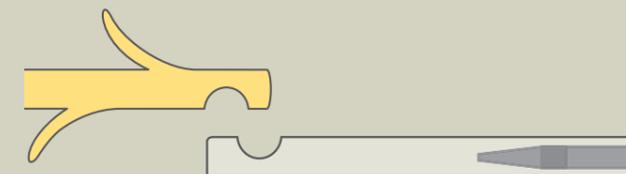

デリバリーシステムの構造

プッシングチューブ先端とステントチューブ末端に半月形状の側孔が空いており、二つを対象に組み合わせ、その中にインナーチューブを通すことで固定されております。



プラスチックステントシステム

Harmo Ray 6Fr

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。
※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元

シルックス株式会社

〒333-0816 埼玉県川口市差間3-32-14
TEL 048-290-5278 FAX 048-298-7681

販売元



ハナコメディカル株式会社

Hanacomedical CO.,LTD.

本 社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
URL: <http://www.hanacomical.co.jp/>
E-mail: eigyoun@hanacomical.co.jp

20KB000



ハナコメディカル株式会社
Hanacomedical CO.,LTD.




プラスチックステントシステム

Harmo Ray 6Fr

新デリバリーシステムによる新たな可能性をご提案します。

従来にないインターロック方式によるリリース方法
(特願 2018-138996/ シルクス株式会社) により、
胆管強度狭窄症例や膵管ドレナージへのより良いアプローチの選択肢として "Harmo Ray" をご提案します。

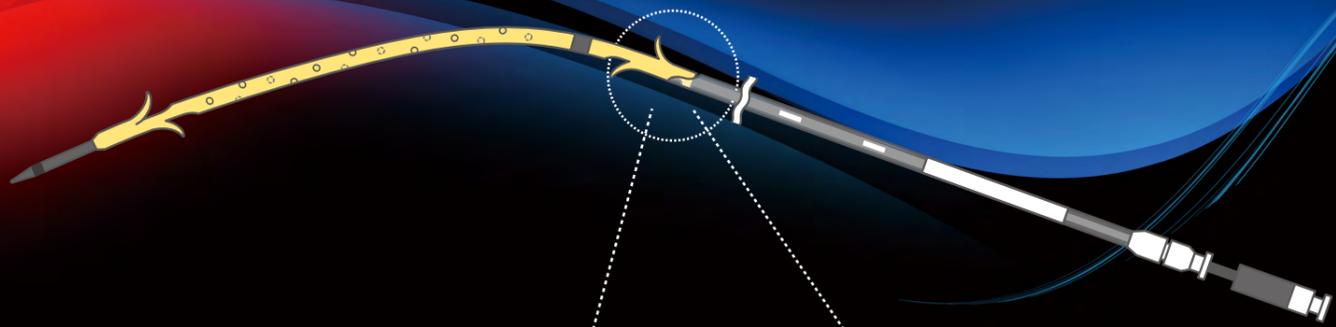


【両フラップ】

ステントチューブの特徴

ドレナージ効果の向上のため、螺旋状にサイドホールをあけた多側孔タイプをラインナップ。

上下フラップ加工による留置後の迷入、脱落防止。


有効長 30mm~150mm までの豊富なバリエーションをご用意。

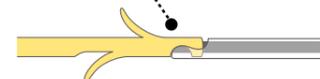

インターロック方式による一体型構造

従来にないデリバリーシステムの構造により細径タイプの設計が可能となりました。

また、デリバリーとチューブステントが一体となったシステムの為、チューブステントをリリースする際の抵抗が軽減されスムーズなチューブステントの挿入が可能となりました。

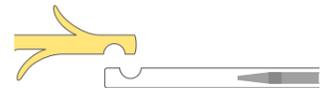


デリバリーシステムの構造

プッシングチューブ先端とステントチューブ末端に半月形状の側孔が空いており、二つを対象に組み合わせ、その中にインナーチューブを通すことで固定されております。

特徴

外径6Frの細径システム

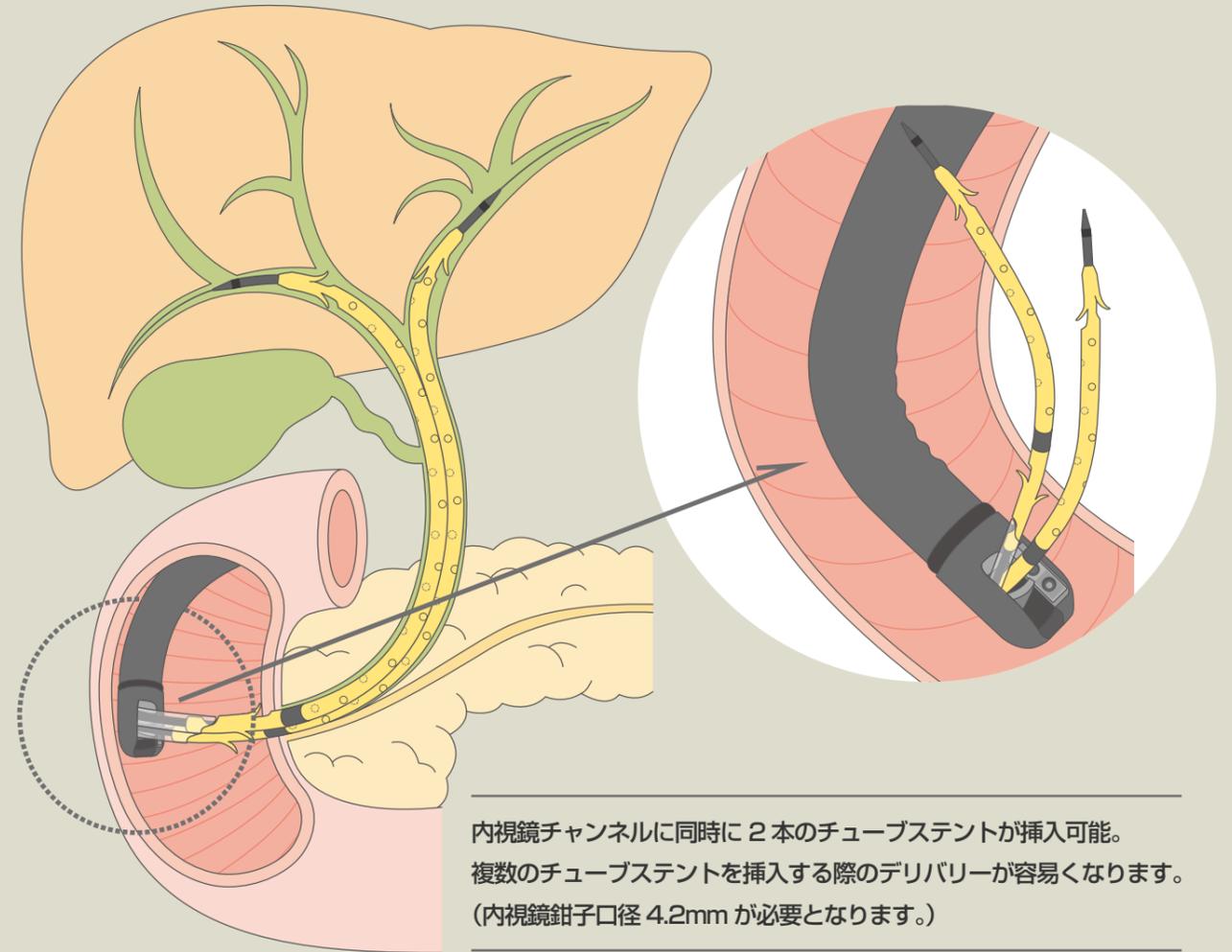

内視鏡チャンネルに同時に2本のチューブステントが挿入可能。
複数のチューブステントを挿入する際のデリバリーが容易くなります。
(内視鏡鉗子口径 4.2mm が必要となります。)

販売名：ダイヤモンドステントセット
医療機器承認番号：21600BZZ00031A01
クラス分類：Ⅲ(高度管理医療機器)
保険請求分類：自動装着システム付・一時留置型

経内視鏡的胆管用ステント

形状	外径	フラップ間長	システム有効長	適合ワイヤー径	適合鉗子口径	サイドホール数	製品番号	JANコード
両フラップ	6Fr	3cm	200cm	0.025inch	3.2mm (※)	6	ERB-RF-60-30-200-SH6	4580136101582
		5cm				10	ERB-RF-60-50-200-SH10	4580136101599
		7cm				14	ERB-RF-60-70-200-SH14	4580136101605
		9cm				18	ERB-RF-60-90-200-SH18	4580136101612
		12cm				24	ERB-RF-60-120-200-SH24	4580136101629
		15cm				30	ERB-RF-60-150-200-SH30	4580136101636

(※)2本同時の挿入の場合は適合鉗子口径は 4.2 mm となります。



プラスチックステントシステム

Harmo Ray

ハーモレイ

8.5Fr



ハナコメディカル株式会社
Hanacomical CO.,LTD.

Harmo Ray・8.5Fr

【両フラップ】



【両フラップ】



ステントチューブの特徴

ドレナージ効果の向上のため、螺旋状にサイドホールをあけた多側孔タイプをラインナップ。
フラップ加工による留置後の迷入、脱落防止。
有効長 30mm～150mm までの豊富なバリエーションをご用意。

デリバリーシステムの構造

プッシングチューブ先端とステントチューブ末端に半月形状の側孔が空いており、二つを対象に組み合わせ、その中にインナーチューブを通すことで固定されております。

販売名：ダイヤモンドステントセット
医療機器承認番号：21600BZZ00031A01
クラス分類：Ⅲ(高度管理医療機器)
保険請求分類：自動装着システム付・一時留置型

経内視鏡的胆管用ステント

形状	外径	フラップ間長	システム有効長	適合ワイヤー径	適合鉗子口径	サイドホール数	製品番号	JANコード
両フラップ	8.5Fr	3cm	200cm	0.035inch	3.7mm以上	6	ERB-RF-85-30-200-SH6	4573561593831
		5cm				10	ERB-RF-85-50-200-SH10	4573561593848
		7cm				14	ERB-RF-85-70-200-SH14	4573561593855
		9cm				18	ERB-RF-85-90-200-SH18	4573561593862
		12cm				24	ERB-RF-85-120-200-SH24	4573561593879
		15cm				30	ERB-RF-85-150-200-SH30	4573561593886

販売名：ダイヤモンドステントセット
医療機器承認番号：22700BZX00392A01
クラス分類：Ⅲ(高度管理医療機器)
保険請求分類：不可

経内視鏡的膵管用ステント

形状	外径	フラップ間長	システム有効長	適合ワイヤー径	適合鉗子口径	サイドホール数	製品番号	JANコード
両フラップ	8.5Fr	3cm	200cm	0.035inch	3.7mm以上	6	ERP-RF-85-30-200-SH6	4573561593893
		5cm				10	ERP-RF-85-50-200-SH10	4573561593909
		7cm				14	ERP-RF-85-70-200-SH14	4573561593916
		9cm				18	ERP-RF-85-90-200-SH18	4573561593923
		12cm				24	ERP-RF-85-120-200-SH24	4573561593930
		15cm				30	ERP-RF-85-150-200-SH30	4573561593947

※ 製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。 ※ 使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元

シルックス株式会社

〒333-0816 埼玉県川口市差間3-32-14
TEL 048-290-5278 FAX 048-298-7681

販売元



ハナコメディカル株式会社

Hanacomedical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
URL: <http://www.hanacomedical.co.jp/>
E-mail: eigyou@hanacomedical.co.jp